

## **Návod k údržbě stomatologické soupravy A-dec**

### **Po každém pacientovi**

- Vyčistit a sterilizovat koncovky pistole
- Vyčistit, namazat a sterilizovat koncovky (kolénka a turbínky)
- Propláchnout vodní cesty (koncovky, pistole, OZK atd.)
- Vyměnit všechny jednorázové návleky

### **Denně nebo podle potřeby**

- Čištění sacího systému

### **Týdně**

- Čištění ventilů HVE a odsliňovačky
- Dvakrát týdně zkontrolujte a vyčistěte sítko savek
- Sejměte a očistěte kryt světla

### **Měsíčně**

- Kontrola a výměna filtru ve sběrači oleje
- Mazání o-kroužků HVE a odsliňovačky

### **Ročně**

- Vyměňte a namažte o-kroužky pistole
- Namažte tlačítka pistole
- Vyměňte a namažte o-kroužky HVE a odsliňovačky